

Nützliches für die Werkstatt

Werter Optiker,

nachfolgend geben wir Ihnen einige wichtige Informationen, damit Sie Ihren Kunden ein perfektes Produkt von STAFFAN PREUTZ DESIGN übergeben können.

Justierung

Alle Justierungen erfolgen mit leichtem Druck - ohne Erhitzen.

Die Bügel


Es ist sehr wichtig, dass die Bügel die richtige Länge haben. Sie dürfen weder zu kurz noch zu lang sein. Wenn die Bügel zu kurz sind, lassen sich die Bügelenden aufgrund der Flexibilität der Fassung noch hinter die Ohren ziehen, wobei ein konstanter Druck auf die Nase ausgeübt wird und unnötige Druckstellen entstehen. Wenn die Bügel zu lang sind, rutscht die Brille die Nase hinunter.

Die Bestellung von Bügeln mit Überlänge ist möglich. Vergleichen Sie anhand Ihrer Musterfassung und geben Sie Ihre Wünsche in der Bestellung an, z.B. +5mm. Wir können die Bügel auch gerade zuschicken, so dass die Justierung direkt am Kunden erfolgen kann.

Die Bügelenden

Die Bügelenden wurden ausgehend von völlig neuen Vorstellungen, wie die Bügel hinter dem Ohr sitzen sollen, entworfen. Sie werden nicht wie gewöhnliche Bügelenden hinter dem Ohr befestigt, sondern zwischen Bügel und Ohr muss Platz bleiben. Die Bügelenden verfügen über große, flache Kontaktflächen, die das Verrutschen der Bügelenden verhindern. Durch einen leichten Druck von den elastischen Bügeln (Betatitan) und durch den Federungseffekt der Fassung entsteht mit Hilfe dieser Fläche eine Bremswirkung, die das Herunterrutschen der Brille verhindert.

Falls die Brille trotzdem nach vorne rutscht, wird dies von der Form der Bügel und den Seitenstegen ausgeglichen (siehe Abbildung).

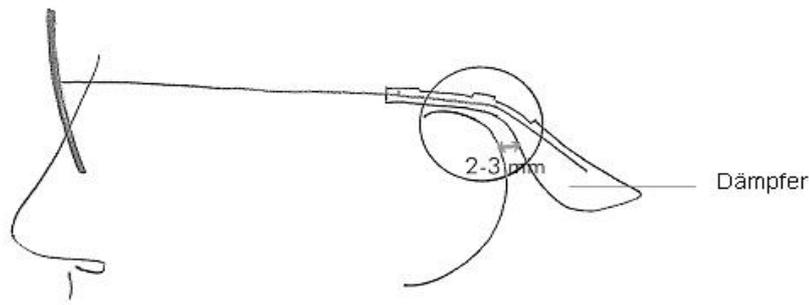

Die Brücke

Auch die Gestaltung der Brücke unterscheidet sich erheblich von der traditioneller Brillenfassungen. Mit einer einfachen Justierung können sie breiteren und schmalere Nasen angepasst werden, indem die Halterungen der Seitenstege nach außen oder nach innen gebogen werden. Bitte beachten Sie, dass eventuelle deutlich sichtbare Stellen auf der Nase des Kunden daher rühren, dass die Bügel zu kurz sind (siehe oben im Abschnitt Die Bügel).

Eine einzigartige Möglichkeit besteht darin, den Abstand der Fassung zum Auge zu verändern. Es gibt 2 Brücken (Version 2) mit unterschiedlicher Dicke. Die Brücken werden mühelos ersetzt und in die Fassung geklickt.


Die Gestellwölbung

Staffan Preutz Designs einzigartige Konstruktion erlaubt den Einsatz optischer Gläser mit hoher Gestellwölbung zur Erzielung eines Wrap-Effekts. Für den besten Effekt empfehlen wir die Wölbung 6.

Bitte beachten Sie bei diesen Bestellungen Folgendes:

Wenn der Kunde eine Fassung mit normaler Gestellwölbung probiert hat und die Größe passt, sollten +2mm in der Breite bestellt werden, sofern Wrap gewünscht wird, denn die Fassung wird schmaler empfunden, wenn die Vorderfront stärker gewölbt ist.

Die Bügel werden gerader als bei gewünschter normaler Gestellwölbung gebogen. Dadurch wird der Federungseffekt der Fassung etwas verringert und ein Kompromiss erforderlich (siehe Justierung gemäß Abbildung).

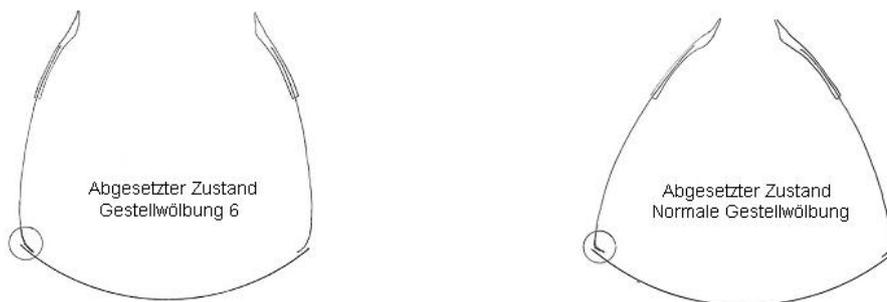

Einschleifen

Falls Gläser zu klein oder zu groß gearbeitet wurden, können diese auf einfache Weise gerettet werden. Ein oder mehrere Silikonringe können in der Nutfräsung angebracht werden, wenn die Linse zu klein geschliffen wurde. Silikonringe sind in unseren Ersatzteilboxen enthalten. Wenn die Linse etwas zu groß geschliffen wurde, lässt sich das Material auf der Innenseite der Fassung mit einem rasierklingscharfen Messer abkratzen.

Bremsöl

Bremsöl wird verwendet, falls und wenn sich die Bügel zu leicht zusammenklappen lassen. Dafür wird ein kleiner Tropfen an der Bügelbefestigung aufgetragen, so dass er zwischen Befestigung und Bügel läuft. Es dauert etwa einen Tag, bis der Bremsseffekt einsetzt.

Alle Linsenmaterialien

Alle modernen Linsenmaterialien, Stärken und Gestellwölbungen können verwendet werden, von CR39 bis zum Brechungsindex 1,8. Für die TRIM-Kollektion empfehlen wir auf jeden Fall höherbrechendes Material, da die Bügel direkt ans Glas montiert werden

Ersatzteil- und Montageboxen

Ersatzteil – und Montagebox ist erhältlich.

Größenänderungen

Größenänderungen stellen eine einzigartige Möglichkeit dar, das ausgesuchte SPD-Modell auf einfache Art dem Kunden anzupassen. Alle SPD-Modelle können in 9 verschiedenen Größenänderungen bestellt werden. Eine Liste der möglichen Größenänderungen sind im Informationsmaterial über Staffan Preutz Design zuge-schickt beigefügt. Für weitere Wünsche wenden Sie sich bitte an AS Brillenmode.